

**Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе  
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch**

**Инструкция по установке текущей даты и времени после наступления 2021 года**

Настоящая инструкция содержит сведения, необходимые для установки текущей даты и времени после наступления 2021 года в анализаторах паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch (далее – анализаторах).

Перед проведением процедуры, описанной в настоящей инструкции, необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации на анализатор.

При наступлении 2021 года в анализаторах текущая дата будет отображаться корректно (произойдет автоматический переход на 2021 год), однако при возникновении необходимости скорректировать дату в соответствующем меню анализатора установка 2021 года (и выше) будет недоступна, так как конфигурация анализаторов позволяет установить текущую дату в диапазоне с 01.01.2000 по 31.12.2020.

1. Если в анализаторе произошел сброс текущей даты (например, после замены литиевой батарейки), то для установки в анализаторе 2021 года выполните следующие действия:

1) установите дату 31.12.2020, касаясь стилусом соответствующих стрелок и выбирая нужное число в выпадающем списке (рисунок 1);

2) установите время 23:59, касаясь стилусом соответствующих виртуальных кнопок «+» и «-» (рисунок 1);

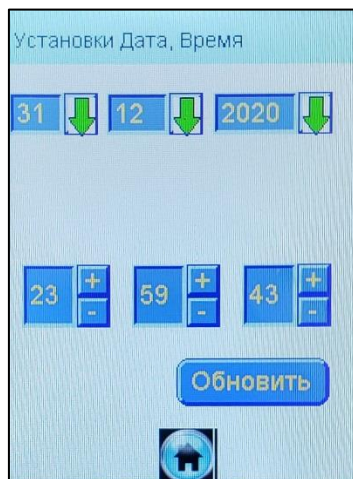


Рисунок 1 – Меню установки даты и времени

3) по достижении времени 23:59:59 произойдет автоматический переход даты на 01.01.2021;

4) установите требуемую дату и время, не касаясь стрелки справа от поля «год».

2. Для установки в анализаторе 2022 года (и более) выполните действия по аналогии с описанными выше:

1) установите дату 31.12.2020 и время 29:59, дождитесь автоматического перехода на 2021 год;

2) установите дату 31.12.2021 и время 29:59, не касаясь стрелки справа от поля «год»;

3) по достижении времени 23:59:59 произойдет автоматический переход даты на 01.01.2022;

4) установите требуемую дату и время, не касаясь стрелки справа от поля «год».